



Amigo



Hordozható ágybavizelés-riasztó

Amigo

Hordozható ágybavizelés-riasztó Rodger BV tervei alapján

Hordozható ágybavizelés-riasztó

Az **Amigo** ágybavizelés-riasztója segít a gyermekeknek megelőzni az ágybavizeléses baleseteket. Kis mérete és könnyű súlya miatt könnyen magával viheti. Három különböző változatban kapható.

Megoldás a bepisülésre

Az **Amigo** ágybavizelési riasztót kifejezetten az éjszakai és a nappali bepisülés leküzdésére fejlesztették ki. A riasztórendszer a ruhára rögzíthető, és vizelet/nedvesség esetén rezgés- és/vagy hangjelzést ad, ami tudatja a gyermekkel, hogy vizelt és WC-re kell mennie.

Az Amigo ágybavizelés-riasztónak három változata van:

- *Vezeték nélküli Amigo*

Az Amigo első változata, amely külön jeladóval rendelkezik. A Vezeték nélküli Amigót a Rodger speciális érzékelőivel ellátott alsónadrágjával együtt kell használni, így biztosítva a maximális kényelmet. A jeladó a nadrághoz gombokkal rögzíthető. Az Amigo akkor jelez, ha az alsónadrág nedvességet érzékel.

- *Gombos Amigo*

A második változat kábellel működik, és a Rodger speciális érzékelőivel ellátott alsónadrágjával együtt kell használni. A kábel a szenzor nadrágjának nyomógombjaira van rögzítve. Könnyen kezelhető és egyszerű csatlakoztatni.

- *Csíptethető Amigo*

A harmadik változathoz egy csíptethető kábel tartozik. A csipeszt a saját alsónemű külső részére kell rögzíteni. A Rodger speciális alsóneműje nélkül is használható. Amint a csipesz nedvességet érzékel, az Amigo riasztója megszólal. A csíptethető Amigo egy pénztárcabarát megoldás bepisülés megelőzésére.

Műszaki adatok:

- Tömeg: 144 gramm
- Amigo átmérője: 6 cm
- Kábel: 77 cm (csipesz nélkül)
- Csipesz: 3x1,5 cm
- Elemek: 2x AAA
- Bemeneti feszültség 2.0 – 2.4V
- Riasztás és rezgés funkció

Gyártói Ügyfélszolgálat:

E-mail: info@rodger.nl

Telefon: +31(0)541-351449 munkanapokon 9 órától 16:30-ig.

Gyártói Kapcsolatfelvétel:

Rodger BV
Langakker 5c
5371EV Ravenstein
Hollandia

Garancia:

A **Rodger** két év garanciát vállal a készülék átvételétől számítva a gyártói hibákra, valamint a rendeltetésszerű használat során bekövetkező törésre, meghibásodásra, amelyeket a gyártó bírál el.

Ez a garancia nem terjed ki a gondatlan használatból vagy a kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartásából eredő károkra.

A garancia kizárólag az eredeti vásárló által érvényesíthető, valamint rendelkeznie kell a vásárlást igazoló nyugtával vagy bizonylattal. A termékre nem vállalunk garanciát, amennyiben azt harmadik fél javítja. A **Rodger** fenntartja a jogot a műszaki adatok és a garancia előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.





Vezeték nélküli Amigo használati utasítása

Csomag tartozékai:




- 2x AAA-elem
- 1 x CR2032-elem
- 1 x rövid használati utasítás
- 1 x Rodger Amigo
- 1 x jeladó
- Naptár + matricák
- Kis csavarhúzó
- Figyelmeztető füzet

Összeszerelés lépései:

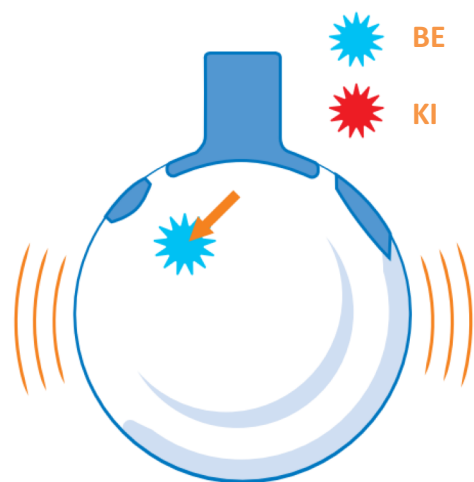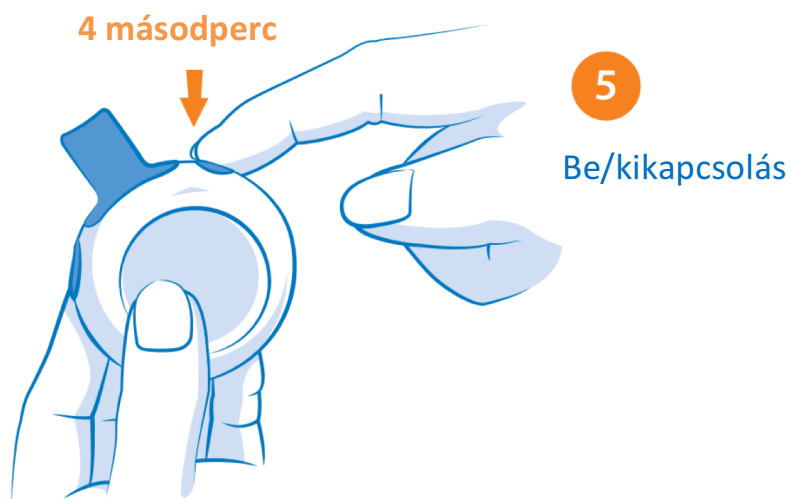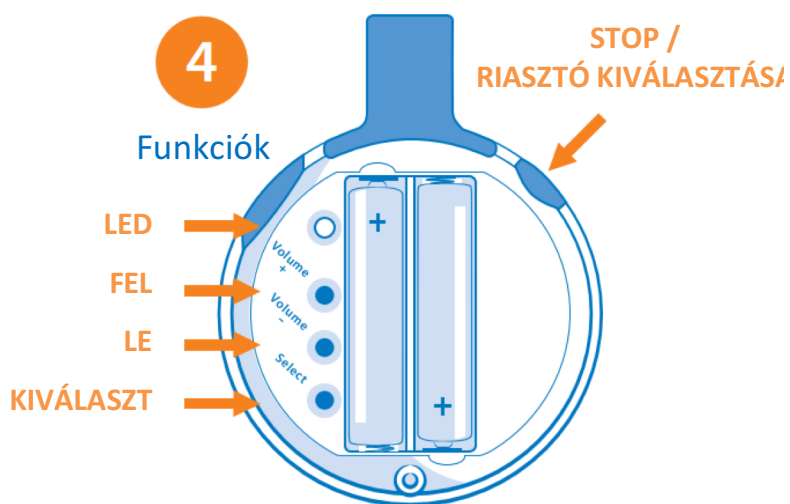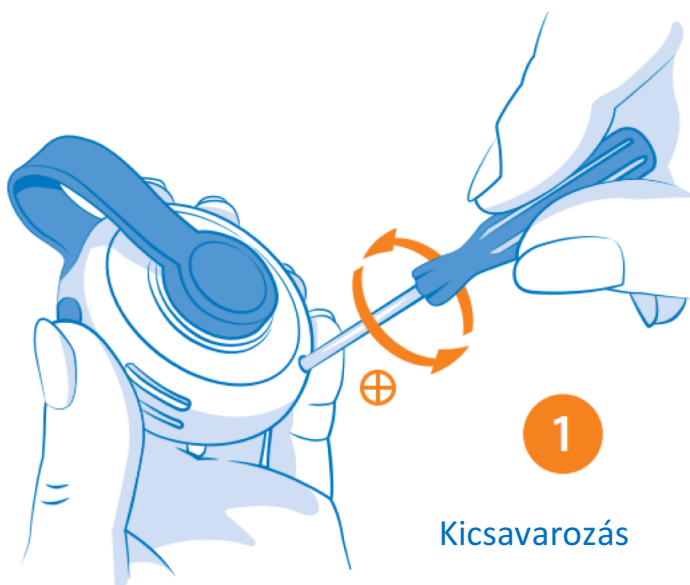

A LED világít és a készülék rezeg

3 másodperc

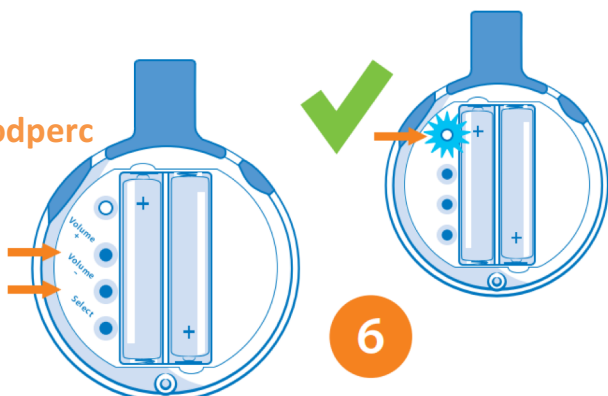

Párosítás: nyomja meg egyszerre a + és a – gombot


7

Csatlakoztassa az érintkezőket a fém résszel



Válassza ki a riasztás hangját

KIVÁLASZTÁS

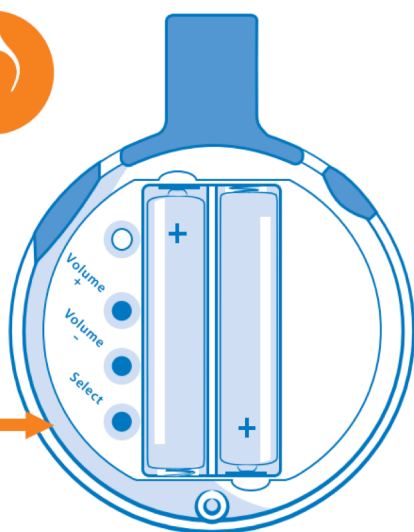


Hangerő




FEL

LE

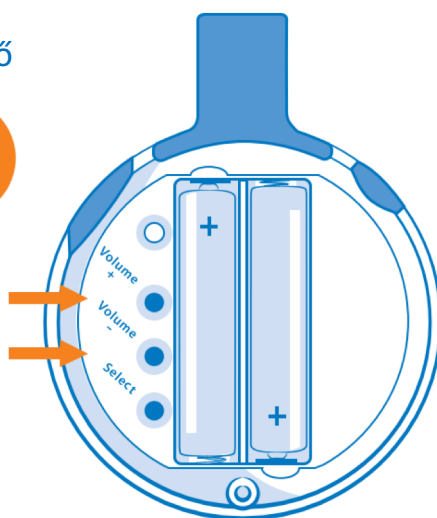

Hang/rezgés

STOP/RIASZTÓ
KIVÁLASZTÁSA

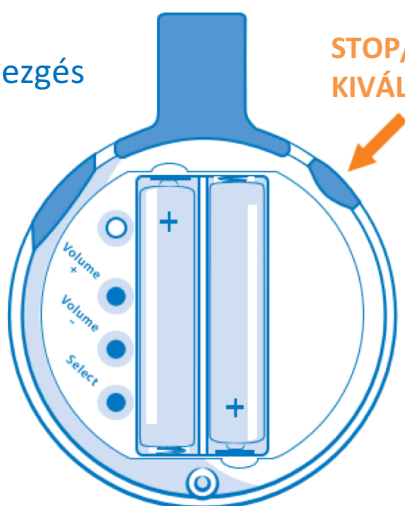

ISO9001 szabvány szerint gyártva.
Készült Hollandiában.
2 db AAA-elemet tartalmaz.




Gombos Amigo használati utasítás

Csomag tartozékai:




- 2x AAA-elem
- 1 x rövid használati utasítás
- 1 x Rodger Amigo
- 1 x Rodger kábel
- Naptár + matricák
- Kis csavarhúzó
- Figyelmeztető füzet

Összeszerelés lépései:

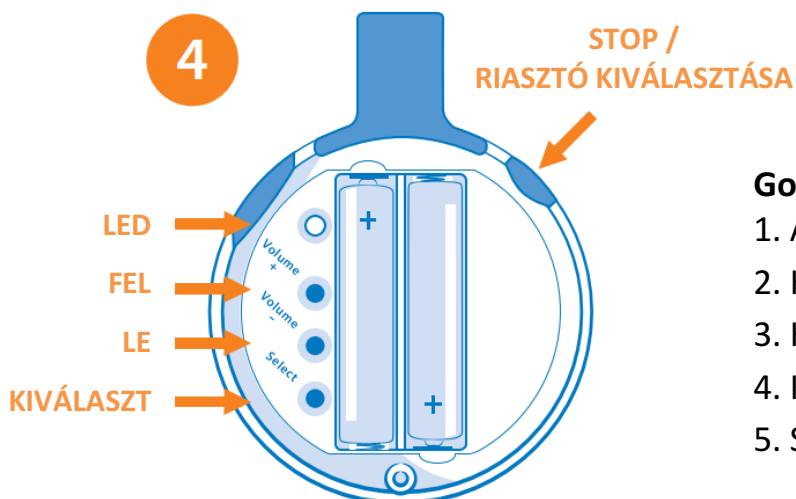

Gombok és jelzések

1. Állapot-LED
2. Hangerő növelése (UP)
3. Hangerő csökkentése (DOWN)
4. Kiválasztás/automatikus gomb (SEL)
5. Stop/Rezgés/Hang gomb (STOP)

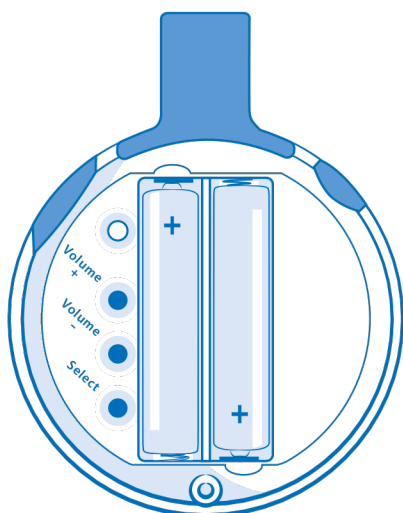

1. Lépés

Elemek behelyezése

2 x AAA



2 db 1,5 V-os alkáli AAA-elem.

2. Lépés

Csukja le az elemtartó fedelét!

3. Lépés

Csatlakozás az alsóneműhöz

- Kapcsolja be az Amigót!
- Dugja be a csipeszhez tartozó kábelt!

Vezetékes Rodger alsónemű esetén

- Csatlakoztassa a vezetéket a Rodger alsóneműhöz, és tegye fel az Amigót!

Vezetékes sima alsónemű esetén

- Rögzítse az érzékelőt az alsóneműre, és tegye fel az Amigót!
- Riasztás esetén nyomja meg röviden a STOP-gombot a riasztás leállításához!



Csíptethető Amigo használati utasítása

Csomag tartozékai:



- 2x AAA-elem
- 1x rövid használati utasítás
- 1x Rodger Amigo
- 1x Rodger kábel
- Naptár + matricák
- Kis csavarhúzó
- Figyelmeztető füzet

Összeszerelés lépései:



