



HU

Vezeték nélküli ágybavizelés-riasztórendszer

Termékleírás

Használati

útmutató

Garancia





Köszönjük, hogy a Rodger ágybavizelés-riasztót választotta!

Útmutató:

A visszajelzések alapján az ágybavizelés-riasztó rendkívül sikeres helyes használat esetén. Kérjük, mindenképp olvassa el az összes utasítást használat előtt!

- 5 évesnél idősebb gyermekek számára alkalmas.
- A sikeres terápiához elengedhetetlen a motiváció és a magabiztosság.
- Használat előtt tesztelje a riasztót, hogy Ön és gyermeke is megismerkedjen a működésével és a hangjával! Ismételje meg ezt gyermeke lefektetése előtt is!
- Ne tegye verseny tárgyává a terápiát, az csak nyomás alá helyezi a gyermeket!
- Ne tegye közvetlenül az ágy mellé a riasztót, hogy gyermekének fel kelljen kelnie a kapcsoláshoz!
- Alkalmanként jutalmazza gyermekét! Egy kis ajándék hatékony pozitív megerősítésnek bizonyul.
- Használja a Rodger ágybavizelés-riasztórendszerét minden este mindaddig, amíg 14 egymást követő éjszakán keresztül nem történik baleset!
- A terápia néhány héttől néhány hónapig is eltarthat. A siker kulcsa a kitartás!
- Ha teheti, használják a riasztót minden este megszakítás nélkül!
- Ha gyermeke baleseteinek száma nem csökken 3 hónapon belül, keresse fel kezelőorvosát az egészségügyi problémák kizárása érdekében!
- Ne kezdje el a terápiát nagyobb események bekövetkezése előtt, például költözés vagy új gyermek születése!
- Ne ébressze fel gyermekét éjszaka, hogy WC-re menjen!
- Soha ne büntesse gyermekét! Gyermeke nem felelős az alkalmi balesetekért.
- Ne tiltsa meg gyermekének, hogy lefekvés előtt igyon! A kevesebb ivás nem csökkenti a balesetek valószínűségét. Lefekvés előtt azonban fontos, hogy gyermeke ne igyon koffein, csokoládé vagy szénsavas tartalmazó italokat.
- A kezelés első napjaiban előfordulhat, hogy a mély álomban lévő gyermek nem ébred fel. Érdemes tesztelni a különböző hangjelzéseket. További megoldás, ha a gyerek mellett alszik, és segít gyermekének felébredni a riasztó megszólalásakor.
- Kezdetben mindenképp győződjön meg róla, hogy gyermeke leállítja a riasztót, és kimegy a WC-re! Idővel „ráhangolódik”, és ezt önállóan teszi.
- Tárolja az eszközt alkatrészeket együtt. Tárolás előtt távolítsa el az akkumulátort!

A riasztó felszerelése:

- Helyezze a csatlakozót a jelvevőbe!
- Csatlakoztassa a jelvevőt a konnektorba, és kapcsolja be a LED-gomb **(A)** megnyomásával, amely zölden fog világítani!
- A riasztó használatra kész!
- A jelvevő elemekkel is használható. Soha ne használja egyszerre az elemet és a központi áramot (konnektor)!

A jeladó vagy második vevő párosítása:

Az adó és a vevő már párosítva van.

Csak akkor kell párosítani az adót és a vevőt, ha:

- 2 vevőt használ 1 adóhoz - a második vevőt párosítani kell.
- új adót használ egy meglévő vevővel.

- Csatlakoztassa a vevőt a konnektorhoz, és kapcsolja be a LED-gomb **(A)** megnyomásával, amely zölden fog világítani!
- Nyomja le egyszerre a – és a + gombot **(B + C)**, tartsa nyomva 3 másodpercig! A LED-gomb **(A)** zölden villogni kezd.
- 1 percen belül össze kell, kösse a jeladó két nyomógombját a jelvevő fémszalagjával **(F)**. Az adó és a vevő akkor párosul, amikor a LED zölden világít, és a vevő hangot ad ki.
- A párosítás meghiúsulását az eszköz 1 perc utáni szirénája jelzi.

Riasztó teszt:

- Győződjön meg róla, hogy a vevő be van kapcsolva, és a hangerő be van állítva (+ gomb **(C)**)!
- Csatlakoztassa az adó két nyomógombját a vevő fémszalagjához **(F)**! Ekkor a riasztó megszólal, és a LED **(A)** pirosan villogni kezd.
- A riasztó kikapcsolható a LED-gomb **(A)** megnyomásával.

A riasztó hangjának beállítása:

| Ahhoz, hogy minden riasztás ugyanazt a hangot adja:

Válassza ki a kívánt hangot a KIVÁLASZTÁS / SELECT gomb **(D)** megnyomásával! Az utoljára kiválasztott hang lesz hallható minden riasztásnál.

A hang teszteléséhez kösse össze az adó két nyomógombját a vevő fémszalagjával **(F)**! Ekkor a riasztó megszólal, és a LED **(A)** pirosan villogni kezd.

| **Ahhoz, hogy minden riasztás másmilyen hangot adjon:**

Nyomja meg az AUTO-gombot **(E)**! Minden riasztáskor a 8 rendelkezésre álló hang közül egy véletlenszerű lesz hallható.

| **Hatótávolság:**

A vevő és az adó hatótávolsága szabad levegőn maximum 30 méter. Épületeken belül a hatótávolság kevesebb mint 30 méter.

Használati tippek:

- A jeladót azonnal távolítsa el a nedves alsóneműből! Meghosszabbítja az elem élettartamát, és megakadályozza az alsónemű szakadását.
- Mosás előtt vegye le a jeladót az alsóneműről! A garancia érvényét veszti, ha a jeladó mosógépben való mosás közben sérül.
- Az eszköz közvetlen közelében lévő egyéb jeladók (pl. vezeték nélküli babafigyelő, garázkapu-nyitó, fejhallgató stb.) megzavarhatják a riasztórendszert. Módosítsa a többi eszköz frekvenciáját, vagy távolítsa el őket!

| **Figyelem!**

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a konnektor használata közben!

Kérjük, kövesse az elemek ártalmatlanítására vonatkozó helyi törvényeket!

Alsónemű

| **Mosás:**

A megfelelő működéshez az alsóneműt mosógépben kell mosni, amivel nedvszívó képességük fokozódik. Az alsónemű mosógépben mosható és szárítógépben szárítható. Ne csavarja ki! Kerülje az öblítő, valamint a klórozott mosószerek használatát! Idővel maradványok halmozódhatnak fel az alsónemű belsejében lévő érzékelő érintkezőin. Egyszerűen be kell áztatnia az érzékelős alsóneműt körülbelül 30 percre ecetes oldatba (1/2 - ecet/víz).

| **Teszt:**

- Vegyen egy csésze langyos, sós vizet (1 teáskanál só 1 csésze vízben)!
- Kattintson a jeladóra az alsóneműn!
- Győződjön meg róla, hogy a vevő be van kapcsolva, és a hangerő be van állítva (+ gomb **(C)**)!
- Ebből a sós oldatból öntsön két teáskanálnyi az alsóneműre! Ennek hatására meg fog szólalni a riasztó, és a LED **(A)** pirosan villogni kezd.
- A riasztó kikapcsolható a LED-gomb **(A)** megnyomásával.

Piktogramok leírása

1. Dugja be a jellevőt a konnektorba, majd kapcsolja be, és állítsa be a hangerőt!
2. Húzza fel gyermekére az alsóneműt!
3. Rögzítse a jeladót az alsóneműhez!
4. Jó éjszakát!
5. A jellevő nedvesség érzékelésekor riaszt.
6. Keljen fel, kapcsolja ki a riasztót, távolítsa el a jeladót, és menjen a WC-re!
7. Ismétlje meg a 2. és 3. lépést!
8. Balesetmentes ébredést!


Sikernaptár leírása

HU



Száraz: Átaludta az éjszakát

Száraz: Kiment WC-re

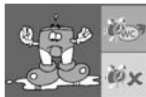

Nedves: Felébredt a riasztásra

Nedves: Átaludta a riasztás



Gyermek: Száraz éjszaka; a gyermek felragaszt egy matricát.
Szülők: Jelölje be a megfelelő helyen!

	1	2		4			

Online sikernaptár

Az online sikernaptár a sima sikernaptár interaktív változata, amely motivációt nyújt a terápia során. Az online sikernaptár használatával értesítéseket kap a terápia előrehaladtáról. Egy balesetmentes éjszaka után gyermeke választhat jutalomként egy neki tetsző játékot.

További információ: www.rodger.nl.

Rezgő párna

A riasztórendszerhez **(G)** rögzíthető vibrációs párna is rendelhető süket vagy nagyothalló gyermekek számára. Ez a tartozék olyan gyermekek számára is hasznos lehet, akiknek extra ingerre van szükségük ahhoz, hogy felébredjenek, észrevegyék a riasztót. A készülék a párna alá helyezendő, amely így értesíti gyermekét a riasztó megszólalásakor.



Matrachuzatok



A matrachuzatok védik az ágyneműt, és szárazon tartják a matracot bepisilés esetén. További információ: www.rodger.nl.

Ügyfélszolgálat

Az ágybavizelés megoldásával vagy az ágybavizelés-riasztó használatával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a beszállítóhoz!

Rendeltetésszerű ártalmatlanítás

Az alábbi jelölés a terméken vagy a leírásában azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy emberi károk megelőzése érdekében kérjük, különítse el a többi hulladéktól, és hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében!

A felhasználókat kérjük, lépjenek kapcsolatba kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal a termék környezetbarát újrahasznosítása érdekében!

Kereskedelmi felhasználókat kérjük, vegyék fel a kapcsolatot beszállítójukkal, és ellenőrizzék a vásárlási szerződés feltételeit! A terméket ártalmatlanítás céljából tilos más kereskedelmi hulladékkal keverni.



Vigyázat!

Ha a hálózati csatlakozót leválasztáshoz használják, a leválasztott eszköznek továbbra is működőképesnek kell lennie.

Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet nem megfelelő típusúra cserélik. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

Garancia

A Rodger egy év garanciát vállal a készülék átvételétől számítva a gyártói hibákra, valamint a rendeltetésszerű használat során bekövetkező törésre vagy meghibásodásra, amelyet a gyártó bírál el.

Ez a garancia nem terjed ki a gondatlan használatból vagy a kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartásából eredő károkra.

A garancia kizárólag az eredeti vásárló által érvényesíthető, valamint rendelkeznie kell a vásárlást igazoló nyugtával vagy bizonylattal. A termékre nem vállalunk garanciát, ha a harmadik fél javítja. A Rodger fenntartja a jogot a műszaki adatok és a garancia előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.